

Restitution du permis de conduire

L'intérêt de l'analyse des cheveux

Dépistage sur une période étendue

Le cheveu peut s'apparenter à un **enregistreur** de notre consommation en matière d'alcool, de stupéfiants ou de médicaments. Il incorpore les stupéfiants et l'alcool lors de l'irrigation des racines par les vaisseaux sanguins tout au long de sa pousse. Il est non périssable, sa structure et sa composition sont stables dans le temps. Un échantillon de cheveux est donc adapté au dépistage couvrant **de longues périodes** contrairement au sang ou aux urines qui ne donnent qu'une image des heures précédant le prélèvement.



Kit de prélèvement



Prélèvement non-invasif

- 1- **Attacher** une mèche d'une cinquantaine de cheveux ¹
- 2- **Couper** la mèche au ras du cuir chevelu
- 3- **Orienter** la mèche, indiquer les côtés racine et pointe
- 4- **Placer** la mèche dans une enveloppe ou le kit de prélèvement
- 5- **Noter** les informations nécessaires à l'identification et aux analyses

Des **kits de prélèvement** sont disponibles sur simple demande, composés d'une enveloppe, d'un calque, d'un lien et d'un adhésif pour sceller le kit.

¹Dans le cas de plusieurs catégories de dépistage, faire un second prélèvement ou prévoir une mèche d'environ 80 cheveux

Analyses

Dosage d'une famille ou des 4 familles de stupéfiants:

-> **Cannabis, Héroïne, Cocaïne, Amphétamines**

Dosage de l'éthylglucuronide:

-> **Marqueur de l'alcoolisme chronique**



Demande de renseignements

Pour tout renseignement complémentaire, contactez:

Dr Vincent Cirimele

Expert près la cour d'Appel de Colmar

Expert Eurotox

vcirimele@labochemtox.com

Tél : 06 03 75 66 61

Modalités d'envoi

Envoi des prélèvements dans une enveloppe par voie postale, à l'adresse ci-dessous:

Laboratoire ChemTox

3, rue Grüniger - CS 60191

67405 Illkirch Cedex

labochemtox@labochemtox.com

www.labochemtox.com

Tél : 03 90 400 540 - Fax : 03 90 400 541